

Therapie-Table





Verschiedene mögliche Einlegegefässe für den Gebrauch in den Auflageplatten



Therapie-Table

Auflageplatten:

Wasserfeste Kunststoff Platten in verschiedenen Farben, mit diversen Lochungen für Einlegegefässe

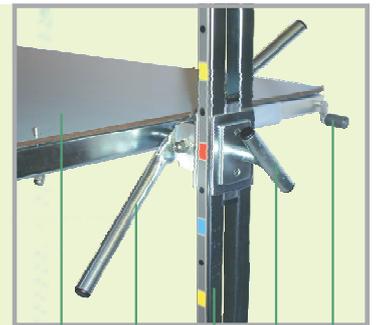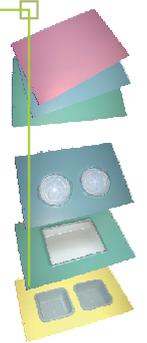

Tischgestell seitlich neigbar, bis 15°

Tischgestell rundum drehbar, 360°

Masskala für Höhen-einstellung

Höhenverstellbar 600 - 1'500 mm

Kurbelverstellung für Feststellwinkel

Tischplatte aufrecht z. B. als Zeichenbrett



Der fahrbare und wandlungsfähige Tisch für Menschen im Rollstuhl. Ein Tisch, dessen Plattform höhenverstellbar ist, die sich schräg stellen lässt, dessen Tischplatten auswechselbar sind und so neue kommunikative Erfahrungs- und Aktivitätsräume erschlossen werden können. Ein rollender Tisch, der auch von einer Einzelperson schnell, handlich und einfach bedient werden kann.

1

karrer|works

Büchelgässli 2

CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44

mobil: +41 (0) 78 660 52 60

www.karrer-works.ch

info@karrer-works.ch

märz-18 | 3-1



2

karrer|works
 Büchelgässli 2
 CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44
 mobil: +41 (0) 78 660 52 60
 www.karrer-works.ch
 info@karrer-works.ch

märz-18 | 3-2

Masse Standardmodell:

Höhe 1'800 mm
 Breite 1'200 mm
 Tiefe 650 mm
 Stahvierkantrohr 20/20 mm, verzinkt
 Andere Masse sind möglich



Stabilität und Design



Funktionell zum Befestigen



Schnell verstellen und einrichten




Funktionell zum Aufhängen



Rollen zum Feststellen



Skala für Höhen-Einstellung

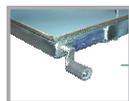

Das Tischgestell ist höhenverstellbar von 600 bis 1'500 mm Höhe, und rundum um 360° drehbar.

Auf das Tischgestell können Platten aufgelegt werden, um so verschiedene Tischfunktionen zu erreichen.

Die Schrägstellung ermöglicht verschiedenstes therapeutisches Arbeiten. Die Platten sind mit Ausschnitten versehen, in die diverse Einlegegefässe eingesetzt werden können. Das Tischgestell kann mit einer entsprechenden Platte versehen auch als ein Zeichenbrett im Stehen benutzt werden.







Das Tischgestell kann seitlich in der Höhe verschoben werden. Dadurch ist auch eine seitliche Schrägstellung bis ca. 15° möglich, und die Höhenverstellung des ganzen Tischgestelles gelingt auch einer Einzelperson.


Im Tischgestell lassen sich von beiden Seiten her durch je zwei Kurbeln die im Tischgestell beweglichen Feststellwinkel verschieben und auf dem Gestell platzierte Gegenstände arretieren. Damit können allenfalls auch von oben her eingeschobene Einlegegefässe festgemacht werden.

Durch Herausnahme der Mitteleinlage können auch grössere Gegenstände fixiert werden.

Im Weiteren ergeben sich ohne den Einsatz der Tischplatte auch Möglichkeiten, für den therapeutischen Einsatz, deren Grenzen nicht abgesteckt sind...

Seitliche Ansicht, mit Tischgestell aufrecht gedreht.

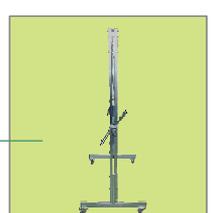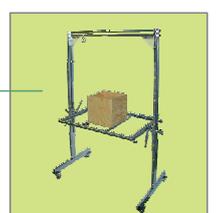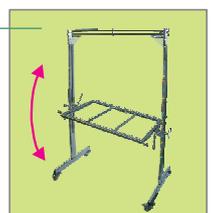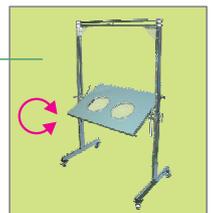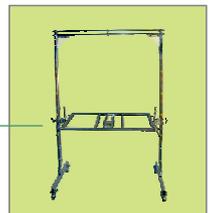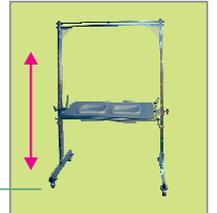

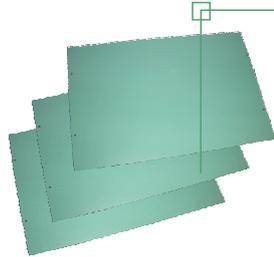

Beispiele von verschiedenen Auflegeplatten, die mit diversen runden, quadratischen oder rechteckigen; mit transparenten, grauen oder mit farbigen Becken ausgerüstet sind. Die Platten lassen sich für jeden spezifischen Verwendungszweck und auf jedes Bedürfnis ausrichten.



Diese Platte wurde für den therapeutischen Einsatz mit einem Fuss-Massage-Sprudel Bad eingerichtet.

Der Rollstuhl Therapie-Table kann auch ohne die Verwendung von Auflegeplatten genutzt werden. Den Möglichkeiten und der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Auflegeplatten + Einlegegefässe

Auflegeplatten

Material:
HPL-Vollkern Platten,
6 mm dick, wasserfest,
beidseitig benutzbar,
Grösse: 900 x 600 mm

Standardmässig sind die Auflegeplatten in Serien zu drei Stück mit der gleichen Farbe erhältlich. Die Farben können aus einer grossen Farbpalette ausgewählt werden.

Die Platten werden auf das Tischgestell gelegt und können mit vier Hutmuttern befestigt werden.

Die Auflegeplatten können als freie Tischfläche ganz genutzt werden, oder sind für den Gebrauch diverser Einlegegefässe und anderer Utensilien mit Lochungen erhältlich, die speziell für jede Platte angefertigt werden.



Einlegegefässe


Die Auswahl, Farbe, Grösse, Kombination und Lage der Gefässe können selber bestimmt werden.

Bevor die Platten angefertigt werden können sollte darüber Klarheit bestehen, wieviel davon gebraucht werden, und mit welchen Farben dass bevorzugt gearbeitet wird.

Farben können Reize bedeuten, die als erwünscht eingesetzt werden können, andererseits aber auch als ein störender Faktor empfunden werden können.

Im Weiteren sollte abgeklärt werden, welche Gefässe einbezogen werden sollten. Hier spielen die Grösse, die Farbe, die Form und die Kombination untereinander eine Rolle. Es dürfte auch eine Ueberlegung wert sein, vorausschauend zu sehen welche Platzierung der Gefässe auf den Platten für die therapeutische Arbeit am meisten Sinn macht.

Therapie-Table

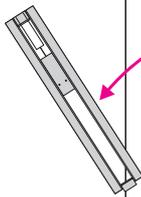

4

karrer|works
Büchelgässli 2
CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch

märz-18 | 3-4

Masse, Material + Pläne

Materialien:

Der Therapie-Table besteht zum grössten Teil aus Stahlvierkantrohr 20/20 mm, verzinkt, sowie weiteren verzinkten Stahlprofilen, alle offenen Rohrenden sind mit Kunststoffschutzstopfen.

Details:

Frontansicht des Tischgestells von vorne.

Masskala für Höheneinstellung.

Grundriss des Tischgestells, von oben mit Auflegeplatte darauf.

Hebel für Tischgestell-Rundum-Feststellung. Kurbeln für Verschiebung Feststellwinkel.

Schnitt des Tischgestell-Grundriss, von oben, mit Mitteleinlage und verschiebbaren Feststellwinkel:

Feststellgriff für Höhenverschiebung und Neigungswinkel des Tischgestells.

Verschiebbare Feststellwinkel.

Herausnehmbare Mitteleinlage.

Therapietisch-Gestell, Frontansicht von Vorne und Seite. Stabilitätsverstrebung, Acrylglas transparent.

